

# Tough-PAC® Reinigungshinweise

## Antimikrobielle Außenhülle

Speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen konzipiert, verfügt das Tough-PAC® iPad Case über eine antimikrobielle Außenhülle und trägt so aktiv zu einer besseren Infektionskontrolle bei. Getestet nach dem ISO 22196 Standard - mehr als 99,6% der kontaminierenden Organismen wurden getötet.

## Tägliche Reinigung

Die tägliche Reinigung sollte dennoch im Rahmen einer Infektions- oder Kontaminationskontrollpolitik durchgeführt werden. Diese Empfehlungen gelten für alle Tough-PAC® Produkte. Bezüglich Richtlinien und Verfahren, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Infektionskontrollteam.

- Tragen Sie geeignete Handschuhe
- Schalten Sie das iPad aus
- Reinigen Sie alle äußeren Oberflächen mit einem feuchten Reinigungstuch\*
- Trocknen Sie alle Oberflächen und den Bildschirm mit einem sauberen Mikrofasertuch

\* Folgen Sie den Benutzeranweisungen Ihres Reinigungsproduktes.

## Reinigung bei Epidemien oder Isolation

- Tragen Sie geeignete Handschuhe
- Schalten Sie das iPad aus
- Reinigen Sie alle äußeren Oberflächen vom Tough-PAC® mit einem feuchten Dekontaminationstuch (lufttrocknen\*)
- Reinigen Sie das Gerät erneut mit einem Reinigungsmittel, insbesondere die Frontblende und die Gehäuskontakte (um Verschmutzungen zu entfernen)
- Trocknen Sie die Oberflächen und den Bildschirm mit einem sauberen Mikrofasertuch

\* 0,1-0,5 % Bleichmittel oder ein Peressigsäure-Wischtuch. Folgen Sie den Benutzeranweisungen Ihres Reinigungsproduktes.

## Reinigung bei Kontamination mit Körperflüssigkeiten

- Tragen Sie geeignete Handschuhe
- Schalten Sie das iPad aus
- Entfernen Sie alle groben Verunreinigungen\*
- Reinigen Sie alle äußeren Oberflächen mit einem feuchten, chlorierten\*\* Reinigungstuch (luftgetrocknet)
- Reinigen Sie das Gerät erneut mit einem geeigneten Reinigungsmittel, insbesondere die Frontblende und die Gehäusekontakte, um verbliebene Verschmutzungen zu entfernen
- Trocknen Sie die Oberflächen und den Bildschirm mit einem sauberen Mikrofasertuch

\* Tauchen Sie das Tough-PAC® nicht in Flüssigkeit ein. Bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten empfehlen wir, diese mit einer geeigneten Reinigungslösung zu entfernen. Um zu prüfen, ob Flüssigkeiten eingedrungen sind, öffnen Sie das Tough-Pac® Gehäuse erst, wenn es von außen völlig trocken ist. Eingedrungene Flüssigkeiten müssen entfernt werden. Ersetzen Sie die Displayfolie und Anschlussstecker bei der erneuten Montage.

\*\* 0,5 % Bleichmittel (5200 ppm aktives Chlor). Folgen Sie den Benutzeranweisungen Ihres Reinigungsproduktes.

## Empfohlene Reinigungsprodukte

Nach dem Entfernen grober Verschmutzungen können die Oberflächen des Tough-PAC® per Spraydesinfektion oder mit einem Flächendesinfektionsmittel per Wischdesinfektion behandelt werden. Für die Reinigung können alle gebräuchlichen Reinigungsmittel verwendet werden. Generell gilt die Einwirkzeit so lange wie nötig, jedoch so kurz wie möglich, zu gestalten. Für die Reinigung ungeeignet sind u.a. Benzine, Aceton, Mittel mit >10 % Chloranteil.

Aufgrund der Vielzahl der am Markt angebotenen Substanzen und kontinuierlicher Marktbewegungen kann leider nur eine Orientierung hinsichtlich der einzusetzenden Substanzen gegeben werden. Eine verbindliche Empfehlung ist nicht möglich. Insofern können wir keine Haftung für den Einsatz und die Anwendung dieser Substanzen übernehmen.

**Zur Beantwortung etwaiger Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.**

### Kontakt

#### **Baaske Medical GmbH & Co. KG**

Bacmeisterstraße 3  
32312 Lübbecke

Tel.: +49 5741 236027-0  
Fax: +49 5741 236027-99

[www.e-medical.de](http://www.e-medical.de)  
[info@e-medical.de](mailto:info@e-medical.de)